



MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE POWERHEART G3 PLUS

Gentile cliente,
in riferimento al defibrillatore Powerheart G3 Plus, Le invio di seguito le informazioni necessarie per la corretta manutenzione e la verifica dello stato di funzionamento.

Per prima cosa verificare il **colore** dell'indicatore di stato:

colore **VERDE**
Defibrillatore OK





colore **ROSSO**
Defibrillatore non funzionante



Nota: l'indicatore di stato NON E' ILLUMINATO ma solo di colore verde o rosso

Nel caso in cui l'indicatore risulti di colore **ROSSO**, aprire il coperchio e seguire le indicazioni vocali; successivamente controllare il pannello di controllo del defibrillatore

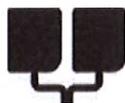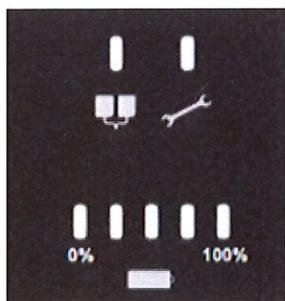

Controllare gli elettrodi. Gli elettrodi non sono presenti, oppure non sono collegati o non funzionano correttamente.



Indica che l'AED richiede un intervento di manutenzione da parte del personale di assistenza autorizzato.



Indica lo stato della batteria dell'AED. Le aree illuminate indicano la capacità rimanente della batteria.

Di seguito troverà le indicazioni per la sostituzione della batteria e/o elettrodi.
Per maggiori informazioni può prendere contatto con la ns. società:

COMETECH Srl

Via Gallodoro, 66/Ter – 60035 Jesi (AN)

P.Iva e CF 02398450425

Tel. 0731.207879 – Fax 1782.747063 – Mail: assistenza@cometech.it

*E 703 J
Compi: 1/A 22%*

BATTERIA



Questo indicatore è costituito da cinque LED, di cui quattro verdi e uno rosso. I quattro LED verdi a destra indicano lo stato di carica della batteria, esattamente come un indicatore della benzina. Con l'uso dell'apparecchio, questi LED verdi si spengono gradualmente (da destra verso sinistra) man mano che il livello di carica della batteria diminuisce. Quando anche l'ultimo LED verde si spegne, si accenderà automaticamente il LED rosso, a indicare che è necessario sostituire la batteria.

Nota: quando il LED rosso si illumina per la prima volta, ad esempio all'apertura del coperchio oppure in un qualsiasi momento durante un'operazione di soccorso, viene immediatamente generato il messaggio BATTERIA SCARICA. Dal momento in cui viene visualizzato il primo messaggio di batteria scarica, il DAE è comunque in grado di erogare almeno altre 9 scariche di defibrillazione.

Nota: se la batteria è completamente esaurita, non si illumina né il LED né il display di testo.


ELETTRODI



L'accensione di uno dei LED degli elettrodi indica una delle condizioni seguenti:

- Elettrodi erroneamente collegati all'AED
- Elettrodi non funzionanti secondo le specifiche operative (freddi, asciutti, danneggiati)
- Elettrodi scollegati dal paziente durante un soccorso

CONTROLLARE LA SCADENZA DEGLI ELETTRODI

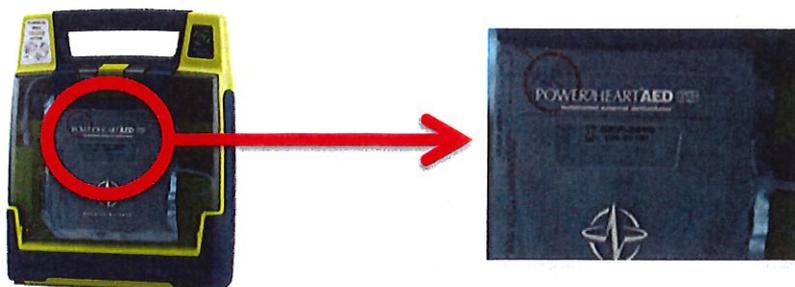

Nel frontale del defibrillatore è posta una finestra dove viene indicata la scadenza degli elettrodi. Gli elettrodi sono monouso e hanno una durata limitata; non devono essere usati dopo la data di scadenza.

**SE LA VOSTRA STRUTTURA E' FREQUENTATA DA BAMBINI
FINO GLI 8 (otto) ANNI DI ETA' O FINO A 25 KG. DI PESO
BISOGNA DOTARSI DI ELETTRODI PEDIATRICI**

Attenzione: Per maggiori informazioni sull'utilizzo e manutenzione del Defibrillatore è consigliato prendere visione del manuale d'uso

CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORE POWERHEART G3 / G3 Plus

Indicare le quantità	Codice	Descrizione	Foto	Prezzo a Voi riservato	Prezzo con IVA 22%
	9146-302	Batteria Durata: 4 anni con garanzia sostitutiva		€ 396,00 + Iva 22%	€ 483,12
	9131-001	Elettrodi adulti		€ 55,00 + Iva 22%	€ 67,10
	9730-002	Elettrodi pediatrici (per utilizzo fino 8 anni o 25 Kg.)		€ 99,00 + Iva 22%	€ 120,78
		In alternativa			
	87.111.65	Elettrodi pediatrici compatibili (per utilizzo fino 8 anni o 25 Kg.)		€ 79,00 + Iva 22%	€ 96,38
	1 6 60	Kit primo soccorso RCP include: pocket mask, guanti, rasoio, forbice, garza, carta per asciugare		€ 15,00 + Iva 22%	€ 18,30

(indicare le quantità e compilare l'anagrafica clienti di seguito riportata)

€ 79,30

Condizioni di vendita

- IVA 22 % Vs. carico
- Validità dell'offerta: 30 gg.
- Spedizione € 10,00 + Iva 22%

Modalità di pagamento

- Cliente *privato*: Bonifico bancario anticipato
- Cliente *pubblico*: Bonifico bancario 30 gg. d.f.
- IBAN: IT 32 G 08086 21200 0000 4019 7321 intestato a Cometech Srl

Dati per Fatturazione Elettronica cod. ufficio:

Solo per cliente pubblico CIG:

Denominazione cliente:

Via:

CAP:

Città:

Prov.:

Partita IVA:

Codice fiscale:

Persona di riferimento:

Telefono:

Mail:

PEC:

Sede di Spedizione Merce (se diversa)

Via:

CAP:

Città:

Prov.:

Per conferma dei dati sopra riportati, per accettazione delle condizioni di vendita di Cometech Srl e per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla Privacy in vigore al momento.

Data e luogo

Nome e Cognome

Firma

Intestazione e/o Timbro del cliente

inviare il modulo via FAX al numero 1782.747063 o all'indirizzo mail "amministrazione@cometech.it"

Comune.casteldilama.ap (tommaso.cavezzi)

Da: "Cometech - Amministrazione" <amministrazione@cometech.it>
Data: giovedì 18 aprile 2019 11:19
A: <tommaso.cavezzi@comune.casteldilama.ap.it>
Allega: Verifica Consumabili Powerheart G3.pdf; Modulo d'ordine Powerheart G3.pdf
Oggetto: Consumabili per Defibrillatore Powerheart G3 Plus

Gentile Cliente,

Le invio in allegato informazioni in riferimento alla sostituzione della batteria e/o degli elettrodi.

Perché devono essere sostituiti gli ELETTRODI del defibrillatore prima della scadenza ?

Dopo tale periodo il gel conduttivo necessario per una precisa rilevazione/diagnosi del tracciato ECG e la trasmissione al paziente dell'eventuale energia si deteriora, non garantendo più le condizioni ottimali per l'analisi e per l'efficacia di terapia.

Rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori informazioni al numero 0731.207879
Distinti saluti

Ufficio Amministrativo



Cometech S.r.l. Unipersonale

Via Gallodoro, 66/Ter • 60035 Jesi (AN) Italy

Tel (+39) 0731.207879 • Fax (+39) 1782.747063

Questa mail è riservata e potrebbero anche essere confidenziale. Qualora non foste il destinatario ed aveste ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di informare immediatamente il mittente e di distruggere questa mail dal vostro sistema. Qualsiasi uso, distribuzione, riproduzione o rivelazione da parte di terzi diversi dal destinatario è severamente vietata per legge.